

6

CARA MEMAKAI PELITUP MUKA N95

1



Basuh tangan sebelum memakai pelitup muka N95

2



Pilih pelitup muka N95 yang bersesuaian dengan pengguna

3



Tangkapkan pelitup muka N95 di bawah dagu dengan kepingan logam penyepit hidung di sebelah atas

4



Tarik dan letakkan tali getah di paras bawah telinga dan tali kedua di paras atas telinga

5



Gunakan kedua-dua belah tangan, tekan dan bentukkan kepingan logam mengikut bentuk hidung

6



Lakukan pemeriksaan cara pemakaian dengan menarik dan menghembus nafas. Betulkan kedudukan pelitup muka N95 sekiranya udara keluar dari sekeliling penutup muka dan hidung